

ポータブル・ファイバースコープ・キャリングケース FC2016

【警告】

使用方法：使用に先立ち、必ず本添付文書および同時に使用する機器の『添付文書』や『取扱説明書』を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。


【禁忌・禁止】

組み合わせ可能なファイバー以外には使用しないこと。揺れが激しいことが想定される運搬には、メーカー純正のケースを使用すること。

併用機器：

PENTAX 社製 ファイバースコープ FNL-10RBS、FNL-7RBS2

【形状・構造及び原理等】

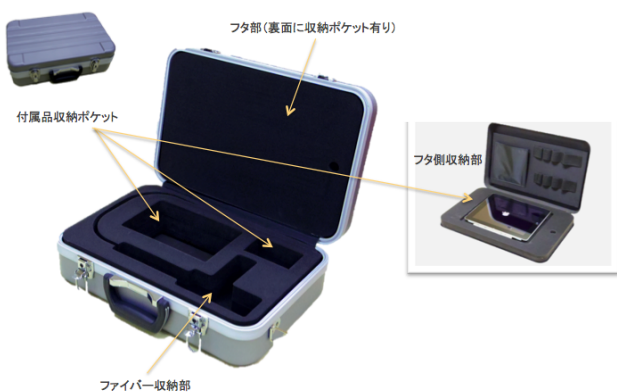

名称	機能
ファイバー収納部	ファイバースコープを収納します。
フタ部	裏面に収納ポケットがあります。
付属品ポケット	付属品等の収納が可能です。
固定用スポンジ	ファイバー収納後に取り付けます。
肩掛けベルト	肩にかける際に使用するベルトです。

【使用目的又は効果】

本製品は組み合わせ可能なファイバースコープを運搬する為の簡易キャリングケースである。

【品目仕様等】

- ・外観寸法：幅 430mm × 奥行 130mm × 高さ 305mm
- ・重さ： 約 2kg (ファイバー等を入れていない状態での重さ)
- ・材質：外装 ABS 樹脂
- ・付属品収納ポケット × 3ヶ所 (本体 × 2、フタ部 × 1)

【使用上の注意】

- ・ファイバースコープの収納、取り出しの際は、ゆっくり丁寧におこなってください。煩雑に行うとファイバーの破損に繋がります。
- ・運搬の際は、必ず固定用スポンジを接眼部付近に取り付け、ファイバーが動かない様にしてください。また、固定用スポンジはアングルレバーを避けて取り付けてください。アングルレバー部に固定用スポンジを取り付けたまま運搬すると、ファイバーの湾曲部を損傷する恐れがあります。
- ・本ケースは防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

保管場所については次の事項に注意すること。

- ・水のかからない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

氏名又は名称：リプト株式会社 (第二種医療機器製造販売業)

住所等：東京都八王子市明神町4丁目9番1号

電話番号：042-49-3491